

## **MomCare IcePad Chladicí vložka, MomCare IcePad Chladiaca vložka**

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

**CZ**

### Popis výrobku:

- Kombinace jednorázového studeného obkladu a hygienické vložky větších rozměrů s vysokou savou účinností a s upevňovacím proužkem vhodná pro období po porodu (2 v 1).
- Studený obklad šitý na míru cíleně zklidňuje poraněnou, citlivou oblast hráze, poskytuje příjemný, osvobozující pocit ve dnech po porodu.
- Pomáhá při zmenšování otoku.
- Zmírňuje příznaky případných zánětů.
- Následkem chladu dochází ke zmírnění krváčení.
- Napomáhá rychlejší regeneraci.
- Praktická manipulace bez zmrazování.

### Návod k použití:

1. Před použitím skladujte vložku při pokojové teplotě.
2. Silným tlakem vložku zmáčkněte v uzavřeném balení, jako byste ji chtěli zlomit, tak dlouho, dokud bublina uvnitř nepraskne (obr.a).
3. Třeste obsahem balení po dobu 5-10 sekund, dokud vložka nezačne chladit (obr.b).
4. Pro použití odstraňte vnější obal a stáhněte lepicí pásek (obr.c).
5. Chladicí účinek trvá déle než 30 minut.
6. Určeno k jednorázovému použití, po použití vyhodte.

### Upozornění:

- Pouze k vnějšímu použití.
- V případě náhodného požití vypijte jednu až dvě sklenice vody a vyhledejte lékaře.
- Udržujte mimo dosah ohně, otevřeného plamene nebo hořlavých materiálů.
- Chladicí vložku netrhejte. Pokud by se tekutina v ní obsažená dostala do styku s pokožkou, zasáhla oči nebo otevřenou ránu – provádějte opláchnutí silným proudem vody a vyhledejte lékaře.
- Výrobek nedávejte do ledničky, neboť při použití může následně chladicí vložka způsobit omrzliny.
- Pokud před použitím zjistíte prosakování, výrobek okamžitě vyhodte.
- Nepoužívejte v případě, že jste citlivá vůči jakékoli složce výrobku.
- Před použitím v každém případě konzultujte se svým lékařem, pokud trpíte některou z těchto chorob: porucha smyslových orgánů, krevního oběhu, Raynaud-syndromu anebo diabetes.
- Udržujte mimo dosah dětí, při pokojové teplotě.

### Složení produktu:

Vnější vrstva z netkané textilie opatřená upevňovacím proužkem, hygienická vložka, chladicí sáček (krystaly dusičnanu amonného a čištěná voda).

Doporučené množství do porodnice: 1-5 ks

SK

Popis výrobku:

- Kombinácia jednorazového studeného obkladu a hygienickej vložky väčších rozmerov s vysokou savou účinnosťou a s upevňovacím prúžkom vhodná na obdobie po pôrode (2 v 1).
- Studený obklad šitý na mieru cielene upokojuje poranenú, citlivú oblasť hrádze, poskytuje príjemný, oslobodzujúci pocit v dňoch po pôrode.
- Pomáha pri znižovaní opuchu.
- Zmierňuje príznaky prípadných zápalov.
- Následkom chladu dochádza k zmierneniu krvácania.
- Napomáha rýchlejšej regenerácii.
- Praktická manipulácia bez zmrazovania.

Návod na použitie:

1. Pred použitím skladujte vložku pri izbovej teplote.
2. Silným tlakom vložku stlačte v uzavretom balení, ako by ste ju chceli zlomiť, tak dlho, kým bublina vo vnútri nepraskne (obr.a).
3. Traste obsahom balenia po dobu 5-10 sekúnd, kým vložka nezačne chlaadiť (obr.b).
4. Pre použitie odstráňte vonkajší obal a stiahnite lepiacu pásku (obr.c).
5. Chladiaci účinok trvá dlhšie ako 30 minút.
6. Určené na jednorazové použitie, po použití vyhodte.

Upozornenie:

- Len na vonkajšie použitie.
- V prípade náhodného požitia vypite jeden až dva poháre vody a vyhľadajte lekára.
- Udržujte mimo dosahu ohňa, otvoreného plameňa alebo horľavých materiálov.
- Chladiacu vložku netrhajte. Pokiaľ by sa tekutina v nej obsiahnutá dostala do styku s pokožkou, zasiahla oči alebo otvorenú ranu – opláchnite silným prúdom vody a vyhľadajte lekára.
- Výrobok nedávajte do chladničky, nakoľko pri použití môže následne chladiaca vložka spôsobiť omrzliny.
- Pokiaľ pred použitím zistíte presakovanie, výrobok okamžite vyhodte.
- Nepoužívajte v prípade, že ste citlivá voči akejkoľvek zložke výrobku.
- Pred použitím v každom prípade konzultujte so svojim lekárom, ak trpíte niektorou z týchto chorôb: porucha zmyslových orgánov, krvného obehu, Raynaud-syndrómu alebo diabetes.
- Udržujte mimo dosahu detí, pri izbovej teplote.

Zloženie produktu:

Vonkajšia vrstva z netkanej textílie s upevňovacím prúžkom, hygienická vložka, chladiace vrečko (kryštály dusičnanu amónneho a čistená voda).

Odporúčané množstvo do pôrodnice: 1-5 ks